

DENTASEPT® 3H Rapide

器械清潔消毒浸泡液



擁有消毒功能的高濃度
浸泡液，適用於牙科器械



用水稀釋，2%濃度

包裝：1公升/瓶 • 3瓶/箱

有效期限：3年
型號：DEN1961146

包裝：5公升/桶 • 1桶/箱

有效期限：3年
型號：DEN1961046

衛署醫器輸壹字第013086號

優點

- 省時，快速消毒及清潔 (作用時間：10分鐘)
- 經濟實用
- 消毒範圍廣泛：能殺死細菌、病毒、黴菌
- 中性PH值，良好的物料兼容性，適用於各類型物料
- 可用於超音波清洗機
- 含有防腐蝕性能，並適用於任何水質
- 新環保配方 (oleochemical formulation) 可快速分解，能有效減低對環境的影響 Medical Device Class IIb (Directive 93/42/EEC modified)

| 效能範圍 | 種類 | 所需時間 | 測試根據歐盟標準 |
|------|-------|------|--|
| | 細菌 | 10分鐘 | 抗藥性金黃葡萄球菌 (MRSA)、鮑氏不動桿菌、海氏腸球菌、綠膿桿菌、抗萬古黴素腸道鏈球菌 (糞鏈球菌) |
| | 結核桿菌 | 30分鐘 | 地分支桿菌 |
| | 酵母/黴菌 | 10分鐘 | 白色念珠菌、黑黴黴 |
| | 病毒 | 5分鐘 | 人類免疫不全病毒、H1N1流感病毒、假性狂犬病毒 (B型肝炎病毒)、牛病毒性腹瀉病毒 (C型肝炎病毒)、疱疹病毒 |

使用前：建議戴上適當的手套



產品成份

Didecyl dimethyl ammonium chloride, chlorhexidine digluconate, polyhexamethylene biguanide, non-ionic surfactant, fragrance and colorant.

注意事項

有關本產品應注意之事項，請參閱包裝上的標籤及健康和安資料表。根據歐盟標準 European Directive 99/45/EC，此配方已歸類為危險品。相關規定 (殺菌或醫療器械方面) 已詳細列明於產品標籤上。


此浸泡液建議每24小時更換一次，並需儲存於 +5°C 至 +35°C
此浸泡液經稀釋後，可使用之有效期最多長達7天



0459

使用方法

- 1 稀釋 Dentasept® 3H Rapide 至 2% 濃度
1公升：可使用瓶內量杯注滿浸泡液至 20毫升，然後倒進 1公升清水
5公升：可按一下按壓器

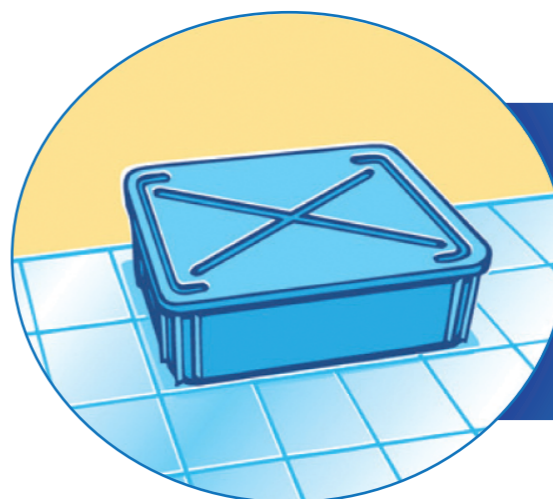

- 2 將需要清潔的牙科器械完全浸透於 Dentasept® 3H Rapide 中，然後蓋上覆蓋物，置於適當作用時間



- 3 當取出已清潔的牙科器械時，須檢查表面有否殘留物。如有需要，可使用刷擦淨



- 4 可使用清水浸洗或沖洗



- 5 瀝乾水份及準備作下一步消毒程序