



BIOACE

管路消毒清潔劑

產品特點

- 治療椅管路強力洗淨、除臭劑。
- 本產品經過SGS檢測(U.S. Pharmacopeia 34 NF 29 Microbiological Tests / Antimicrobial Effectiveness Testing)。
- 測試十分鐘，有效抑制綠膿桿菌、克雷白氏肺炎菌、流感嗜血桿菌、肺炎鏈球菌、化膿性鏈球菌(A型鏈球菌)等有害菌種。
- 可將本產品稀釋至50倍，經濟實用。
- 本產品不含甲醛、壬基苯酚聚乙氧基醇(NPEO)、壬基苯酚(NP)等有害物質。
- 本產品 PH值為 12.5 ± 0.5 。



包裝：2公升/瓶


主成分

Cationic surfactant, Preservative, Chelating agent, Potassium hydroxide, Water.

建議使用方法

Bioace是強力濃縮劑。請務必依照下列方式，使用杯蓋製作稀釋液。

1. 將濃縮液體倒入杯蓋 2/3(約20ml)，並以水1000ml 稀釋(約50倍)均勻混合，再以吸唾管吸取進行清潔程序。
2. 可讓稀釋液於管路中停留一晚，隔天開診再用吸唾管吸取清水清潔管路。
3. 手術後，請先以清水清潔吸唾管路，將血液沖洗乾淨後再使用本產品，效果更佳。
4. 建議每日進行1~2次。

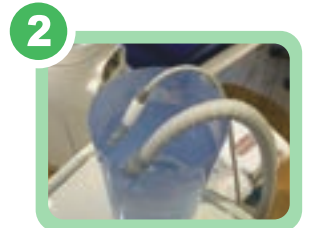

注意事項 請勿使用於治療台管路吸唾管、排唾系統的洗淨、除臭、除菌外的用途。

- 本產品請勿於其他液體混合使用。
- 使用本液體時，請穿戴護目鏡與橡膠手套。
- 本液體沾到皮膚時，請用水充分沖洗乾淨。
- 本產品若不慎沾到眼睛，請用水充分沖洗乾淨後；並立即就醫。
- 萬一誤飲時，請立即飲用大量水或牛奶後；並立即就醫。

