



防銹除菌清潔劑

(牙科器械用)

產品特點

- 優越的洗淨力去除血液、脂肪、蛋白質等污垢。
- 對於鋼、不鏽鋼等金屬器械具有防鏽作用。
- 可依照浸泡液顏色變換確認更換的時間。
- 本產品經過SGS檢測(U.S. Pharmacopeia 34 NF 29 Microbiological Tests / Antimicrobial Effectiveness Testing)。
- 測試十分鐘，有效抑制綠膿桿菌、克雷白氏肺炎菌、流感嗜血桿菌、化膿性鏈球菌(A型鏈球菌)等有害菌種。
- 本產品不含甲醛、壬基苯酚聚乙氧基醇(NPEO)、壬基苯酚(NP)等有害物質。
- 本產品PH值為 8.4 ± 0.5



包裝：4公升 / 瓶

主成分

Chelating agent, Rust inhibitors, Poly oxyethylene secondary alkyl ether, Alcohols solvent, germicide, Water.

建議使用方法

1. 先以清水去除牙科器械表面之唾液或血液。
2. 稀釋標準
用於浸泡牙科器械：請使用產品原液或稀釋為2倍，將清潔後的牙科器械完全浸漬於消毒液中10分鐘。
用於超音波洗淨器：使用時請將本產品稀釋至50倍。
3. 清潔後的器械可檢查表面是否還有殘留物，特別是尤其是「關節」處及「切面」，必要時可使用刷具再次清潔並使用流水沖洗。
4. 完成清潔後，瀝乾或擦拭器械，準備下一階段的消毒程序。
5. 浸泡液更換為3日~1週為基準，當浸泡液變深或有沉澱物時，代表除菌力下降，建議立即更換。



注意事項

- 使用本產品時請穿戴護目鏡、手套。
- 請保管於幼兒無法碰觸到的安全地方。
- 若不慎沾到眼睛或皮膚，請盡速沖洗並前往就診。
- 若不慎誤飲，請盡速喝大量水並前往就醫。
- 請保管於陰涼處，避免日光直曬。
- 本劑請依照建議方式使用，請勿用於其他用途。

