

## 酵素血液分解劑 (牙科器械用)

### 產品特點

- 採用強力酵素劑能去除血液、黏液、組織片等有機物質，達到超音波洗淨器與高消鍋的效果。
- 非亞硝酸防鏽劑配方，防止重要的器具生鏽或腐蝕。
- 含有滲透殺菌生物膜的IPMP配方，發揮良好的殺菌效果。
- 本產品經過SGS檢測(HPLC/DAD)。
- 本產品不含甲醛、壬基苯酚聚乙氧基醇(NPEO)、壬基苯酚(NP)等有害物質。
- 本產品PH值為 8.3

### 主成分

Organic acid salt, Glycol-based solvents, Borate, Alcohols solvent, Corrosion inhibitor, enzyme, Water.

包裝：2公升 / 瓶



### 建議使用方法

1. 先以清水去除牙科器械外表之口水或血液。
2. 稀釋標準  
用於浸泡牙科器具：請將本產品依照需要稀釋10~200倍，將需清潔的牙科器械完全浸漬於消毒液中10分鐘以上。  
用於超音波洗淨器：使用時請將本產品依照需要稀釋至100~200倍。  
器械嚴重髒污時，請將本產品稀釋10~50倍即可。
3. 清潔後的器械可檢查表面是否還有殘留物，特別是尤其是「關節」處及「切面」，必要時可使用刷具再次清潔並使用流水沖洗。
4. 完成清潔後，瀝乾或擦拭器械或準備下一階段的消毒程序
5. 浸泡液建議每日進行更換，當浸泡液變深或有沉澱物時，代表除菌力下降，建議立即更換。



### 注意事項

- 使用本產品時請穿戴護目鏡、手套。
- 請保管於幼兒無法碰觸到的安全地方。
- 若不慎沾到眼睛或皮膚，請盡速沖洗並前往就診。
- 若不慎誤飲，請盡速喝大量水並前往就醫。
- 請保管於陰涼處，避免日光直曬。
- 本劑請依照建議方式使用，請勿用於其他用途。

