



Cavex ImpreSafe

印模材專用滅菌液

- 三分鐘即可殺死細菌/真菌/病毒如：Hepatitis B/C 肝炎、HIV(Aids)、Herpes泡疹病毒、Influenza流行性感冒、Rota羅塔病毒、Vaccinia(Pox)牛痘，滅菌效果高達99.999%。
- 讓牙醫院所能做到近百分之百的感染防護。
- 可用於任何藻酸鹽聚醚類及矽膠印模材消毒滅菌，不傷印模材表面。
- 快速輕鬆浸泡3分鐘，瀝乾，沖清水。
- 高度濃縮，一公升ImpreSafe等於33公升稀釋消毒液，可使用於880個以上的impressions 印模滅菌。


CAVEX ImpreSafe是一種針對藻膠(alginate)、聚醚類(polyether)、矽膠(silicone)牙科印模材所設計的高濃度消毒滅菌液。

只要浸泡3分鐘就可以殺死細菌、真菌、病毒...，而且對於印模材表面不會造成任何不良的影響。

此消毒液不含醛類溶劑，具溫和的氣味，並獲得牙科知名文獻 Dental Advisor五顆星及優選產品的最高評價。



30ml ImpreSafe

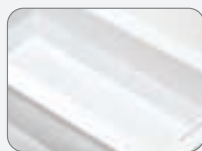

1000ml 清水



稀釋



印模托放於托盤



浸泡3分鐘



托盤上提瀝乾



沖清水



適用於Alginate及任何印模材！
三分鐘滅菌效果高達 99.999%！

